

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Arzt oder Kontaktlinsenspezialisten oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.**

## **Zweckbestimmung:**

Lac®-Ophtal® Gel ist für die Befeuchtung der Augen vorgesehen.

## **Anwendung**

Lac®-Ophtal® Gel sorgt für eine intensive Verbesserung der Befeuchtung der Augenoberfläche bei Beschwerden wie trockenen, brennenden oder müden Augen, die durch Umweltfaktoren verursacht werden, wie beispielsweise langes Fernsehen oder ausgedehnte Arbeit an einem Computer, Heizungsluft oder Luft aus Klimaanlage sowie medizinische Erkrankungen.

## **Zusammensetzung:**

0,2 % Carbomer, Sorbitol, Natriumphosphat – dibasisches Dodecahydrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke und Cetrimid als Konservierungsmittel.

## **Wie oft und wie lange ist Lac®-Ophtal® Gel anzuwenden?**


Geben Sie je nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® Gel kann bis zu 4-mal täglich angewendet werden.

Nach dem ersten Öffnen kann das Produkt 6 Wochen verwendet werden.

## **Wie ist Lac®-Ophtal® Gelanzuwenden?**

Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel die Hände zu waschen.

Die Abbildung zeigt die einfache Verwendung des Produkts.

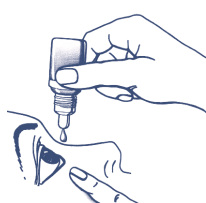

Drehen Sie den Verschluss der Augentropfenflasche ab. Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten, halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge (ohne dabei Ihr Auge zu berühren) und ziehen Sie das untere Augenlid mit dem Zeigefinger der anderen Hand vorsichtig nach unten. Drücken Sie die Flasche zusammen, um einen Tropfen in den unteren Bindehautsack zu geben.

Schließen Sie Ihr Auge und bewegen Sie den Augapfel langsam hin und her, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf für das andere Auge und verschließen Sie die Flasche anschließend sorgfältig.

## **Contraindication**

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren.

Das Produkt darf nicht angewendet werden, wenn zeitgleich eine neurotrophe Keratitis mit Oxervate behandelt wird.

## **Wichtige Informationen zu der Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel**

- In sehr seltenen Fällen können lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen muss die Behandlung beendet werden. Wenn anhaltendes Unbehagen oder Irritationen auftreten, brechen Sie die Anwendung des Produkts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Sicherheitshinweise für Patienten mit schweren Hornhautschäden: In sehr seltenen Fällen wurde über Ablagerungen von Kalziumphosphat auf der Hornhaut während der Behandlung mit phosphathaltigen Produkten für die augenmedizinische Anwendung berichtet.
- Berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit der Flaschenspitze, um eine mögliche Verletzung der Augenoberfläche oder eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie die Flaschenspitze nicht mit den Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Geben Sie die Flasche nach dem Öffnen nicht an andere Personen für deren Gebrauch weiter.
- Bei gleichzeitiger Anwendung eines weiteren Augenpräparates sollten Sie ca. 15 Minuten warten, bevor Sie das andere Produkt anwenden.
- Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® Gelherausgenommen werden. Nach einem Zeitraum von mindestens 15 Minuten können die Kontaktlinsen wieder eingesetzt werden.
- Wenn Ihre Sicht unmittelbar nach der Anwendung des Augengels verschwommen ist, sollten Sie das Führen von Fahrzeugen oder die Bedienung von Maschinen vermeiden.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Wochen nach dem Öffnen.
- Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Flasche vor dem ersten Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen. Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.
- Lac®-Ophtal® Gelenthält Kleinteile aus Plastik, die von Kindern verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr. Daher muss Lac®-Ophtal® Gelfür Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Für die Anwendung dieses Produkts ist keine spezielle Schulung erforderlich.
- Dieses Produkt ist für schwangere, stillende Frauen und Kinder nicht kontraindiziert.
- Wenn Ihr Kind unter trockenen Augen leidet, sprechen Sie vor der Anwendung eines Augengels mit einem Arzt.

## **Lagerung OR Wie ist Lac®-Ophtal® Gelzu lagern?**

Bei einer Temperatur von maximal 30 °C lagern.

## **Entsorgung:**

Das Produkt ist entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen. In Verbindung mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## **Darreichungsform:**

Lac®-Ophtal® Gelist in Packungen mit jeweils 10 g und 3 x 10 g Augengel erhältlich.

Lac®-Ophtal® Gelist zudem in praktischen, konservierungsstofffreien Ein-Dosis-Ophtiolen erhältlich.

## Wie kann Lac®-Ophtal® Gel Ihren Augen helfen?


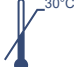











Lac®-Ophtal® Gel verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen werden langanhaltend mit einer wohltuenden und beruhigenden Feuchtigkeit versorgt.

### Was Sie für Ihre Augen tun können:

- Lüften Sie Ihre Räumlichkeiten mehrmals am Tag.
- Denken Sie daran, genügend Wasser zu trinken (mindestens 2 Liter pro Tag).
- Gehen Sie so oft wie möglich an die frische Luft.
- Richten Sie Heiz-/Kühlgebläse, wie beispielsweise im Auto, stets von Ihren Augen weg.
- Achten Sie darauf, dass Sie regelmäßig Pausen einlegen, wenn Sie an einem Bildschirm arbeiten.

Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie auf unserer Website.

### Symbolerklärung

	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren und in einem Einzelsterilbarriersystem verpackt		Temperaturbegrenzung
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung oder Flasche beschädigt ist		Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Wochen nach dem ersten Öffnen
	Gebrauchsanweisung beachten		Verwendbar bis
	Chargenbezeichnung		Medizinprodukt
	Achtung (wichtige Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung)		Herstellungsdatum
	Hersteller Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165/173 13581 Berlin Germany		Einmalige Produktkennung GTIN (01) Produktkennung EXP (17) Verwendbar bis (Format: JJMMTT) LOT (10) Chargenbezeichnung
	Konformitätsbewertung gemäß der Europäischen Verordnung über Medizinprodukte 2017/745 CE-Zeichen mit Nummer der benannten Stelle		

Ausgabedatum:

Lac®-Ophtal® Gel, „I291EU-04“; 2023-07

®/™ sind Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated oder ihren Tochtergesellschaften.

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften