

# Lac®-Ophtal® Gel sine

DR. WINZER

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produkts.**

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit Lac®-Ophtal® Gel sine haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche intensiv befeuchten und beruhigen kann. Somit werden die subjektiven Anzeichen einer Benetzungsstörung langanhaltend gelindert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gerne auch an uns.

## Zweckbestimmung

Lac®-Ophtal® Gel sine ist ein Augenbefeuchtungsmittel.

## Anwendung

Lac®-Ophtal® Gel sine verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage.

## Inhaltsstoffe

Jedes 0,6 ml Ein-Dosis-Behältnis enthält 0,2 % Carbomer, Sorbitol, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke und ist frei von Konservierungsmitteln.


## Wie oft sollten Sie Lac®-Ophtal® Gel sine anwenden?

Je nach Bedarf tropfen Sie 1 - 2 Tropfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® Gel sine kann täglich 3 - 5 mal angewendet werden oder häufiger wenn erforderlich.


## Wie sollte Lac®-Ophtal® Gel sine angewendet werden

Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel sine die Hände zu waschen.


Die Abbildung zeigt die einfache und problemlose Anwendung des Produktes.

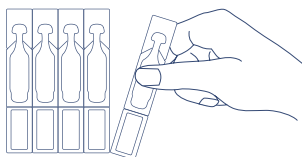


1. Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Streifen ab.

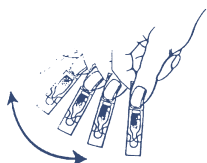

2. Halten Sie das Ein-Dosis-Behältnis am Etikett, mit der Spitze nach unten zeigend und schütteln Sie es leicht, bis das gesamte Augengel im Hals des Ein-Dosis-Behältnisses ist.

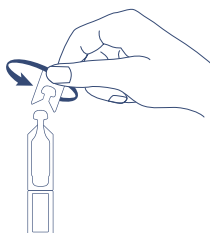

3. Drehen (nicht ziehen) Sie die Verschlusskappe des Ein-Dosis-Behältnisses ab.

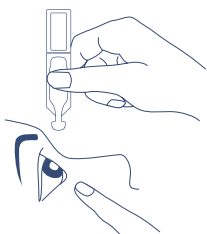

4. Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken und ziehen Sie mit dem Zeigefinger der freien Hand das Unterlid sanft nach unten. Halten Sie das Ein-Dosis-Behältnis so senkrecht wie möglich über Ihr Auge, mit der Spitze nach unten zeigend und drücken Sie das Ein-Dosis-Behältnis leicht zusammen, um einen Tropfen einzuträufeln.

5. Schließen Sie danach Ihr Auge und bewegen Sie es leicht hin und her, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen.

## Gegenanzeigen

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

## Wichtige Informationen zu Lac®-Ophtal® Gel sine

- Sollten Überempfindlichkeitsreaktionen (Reizungen oder Unverträglichkeiten) auftreten, benutzen Sie Lac®-Ophtal® Gel sine nicht weiter.
- Bei anhaltendem Unwohlsein oder Reizungen sollten Sie die Anwendung beenden und Ihren Arzt konsultieren.
- Sicherheitshinweis für Patienten mit schweren Schäden der Hornhaut: In sehr seltenen Fällen wurde über Ablagerungen von Calciumphosphat auf der Hornhaut während der Behandlung mit phosphathaltigen Augenprodukten berichtet.
- Achten Sie darauf, dass das Ein-Dosis-Behältnis nicht mit Ihren Fingern in Berührung kommt, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung oder mögliche Beschädigung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Ein-Dosis-Behältnis nicht Ihr Auge berührt, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

- Bei Anwendung unterschiedlicher Präparate am Auge sollten diese in einem Abstand von ca. 15 min. getropft werden.
- Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung des Augengels herausgenommen werden. Sie können diese 15 (besser 30) Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen.
- Bedienen Sie keine Maschinen oder Kraftfahrzeuge, wenn direkt nach der Anwendung des Gels Ihre Sicht verschwommen sein sollte.
- Verwenden Sie Lac-Ophtal Gel sine nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Ein-Dosis-Behältnisse nach dem Gebrauch entsorgen.
- Überprüfen Sie vor der ersten Anwendung, ob das Ein-Dosis-Behältnis intakt ist. Verwenden Sie keine beschädigten Ein-Dosis-Behältnisse.

### Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® Gel sine gibt es in Packungen mit 30, 60 oder 120 x 0,6 g Augengel in Ein-Dosis-Behältnissen.

### Aufbewahrung

Bewahren Sie das Medizinprodukt bei einer Temperatur von maximal 25 °C und vor Licht geschützt auf.



Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte  
CE Zeichen mit Nummer der Benannten Stelle



Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165/173  
13581 Berlin

Vertrieb:  
Dr. Robert Winzer Pharma GmbH  
Brunsbütteler Damm 165/173  
13581 Berlin  
E-Mail: service@drwinzer.de



Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Oberer Temperaturgrenzwert



Nicht wiederverwenden



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Fertigungslosnummer, Charge



Hersteller



Vor Sonnenlicht schützen

### Ausgabedatum: Lac®-Ophtal® Gel sine, IFU-02; 2021-12

Lac®-Ophtal® ist ein Warenzeichen von Bausch & Lomb oder einer seiner Tochtergesellschaften.

© 2021 Bausch & Lomb Incorporated oder einer seiner Tochtergesellschaften

### Wie kann Lac®-Ophtal® Gel sine Ihren Augen helfen?

Lac®-Ophtal® Gel sine verbessert die Stabilität Ihres Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohltuender und beruhigender Feuchtigkeit versorgt.

### Und das können Sie persönlich tun

- Lüften Sie mehrmals täglich und gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich möglichst häufig an der frischen Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.